

อุปกรณ์ติดตามการหายใจ NANNY
จะดูแลทารกน้อยของคุณ



อุปกรณ์ติดตามการหายใจ NANNY จะดูแลทารกน้อยของคุณ
BM02 อุปกรณ์ดูแลทารก

อุปกรณ์สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ คุณสามารถนอนหลับได้อย่างเป็นสุขโดยรู้ว่าอุปกรณ์จะคอยดูแลการหายใจของลูกน้อย และจะส่งเสียงเตือนและทำให้เห็นได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน NANNY เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ส่วนมากใช้ในโรงพยาบาล



อุปกรณ์ติดตามการหายใจที่ได้รับการ รับรองทางการแพทย์สำหรับทารก

NANNY ผ่านการทดสอบจำนวนมากทางคลินิกที่เข้มข้น
ตามมาตรฐานสหภาพยุโรป 100% ปลอดภัยสำหรับเด็ก
และใช้กันในห้องคลอดและห้องดูแลเด็กแรกเกิด คุณเปิด
มันได้ง่าย ๆ ในความมืด และเมื่อเปิดได้แล้วคุณจะได้ยิน
เสียงแม้ว่าจะมีการปิดประตูหลายครั้ง

85 ประเทศ

อุปกรณ์ติดตามการหายใจ
NANNY ได้รับความนิยม
ในหลายประเทศทั่วโลก

2 แสน

ครอบครัวทั่วโลกพอใจ NANNY
นี้แสดงถึงความสำเร็จ

7 ปี

สำหรับทุกผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการประกัน 2 ปี
คุณยังได้รับการขยายอีกถึง 5 ปีในการดูแลและบริการ

เชื่อมต่อ NANNY ง่ายมาก

การติดตั้ง NANNY ทำได้เร็วและง่าย อุปกรณ์ติดตามการหายใจไม่ต้องใช้การดูแลพิเศษใด ๆ มีแบตเตอรี่ที่มีอายุยาวนาน บ่อยมากที่ใส่แบตเตอรี่เพียงครั้งเดียวในตอนใช้ครั้งแรกเท่านั้น



ใส่ถ่าน
ใส่ถ่านขนาด AA ที่ให้มา
ด้วยในอุปกรณ์



วางแผ่นเซ็นเซอร์
วางแผ่นเซ็นเซอร์ไว้ได้
ที่นอน (สั่งซื้อได้ที่เรา)



เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์
ยึดอุปกรณ์เข้ากับเปล แล้ว
เชื่อมสายเคเบิลเข้ากับแผ่น
รอง



แล้วก็เปิดเครื่อง
ทุกครั้งที่ NANNY ถูกเปิด
จะทำการเช็คทุกฟังก์ชัน
และสถานะแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

NANNY ทำงานอย่างไร

ทุกครั้งที่ทารกหายใจออก แสงสีเขียวจะแสดงบนหน้าจอ ถ้าทารกไม่หายใจเข้าต่อเนื่องนานกว่า 20 วินาที หรือ ความถี่ในการหายใจลดลงต่ำกว่า 8 ครั้งต่อนาที แสงสีแดงแสดงพร้อมกับเสียงเตือน เสียงเตือนสามารถที่จะ ปลุกทารกจากการหลับลึกได้

หายใจเข้า



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0/5

NANNY สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้แม้ว่าทารกเองไม่สามารถทำได้ มันยังสามารถเตือนคุณในกรณีหยุดหายใจชั่วขณะเนื่องจากการอาเจียน

ทำไมต้องใช้ NANNY

อุปกรณ์ติดตามการหายใจ ที่ได้รับรองทางการแพทย์

NANNY เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์
ได้รับความสำเร็จสามารถผ่านการประเมินทางคลินิกที่
เข้มงวดได้ อุปกรณ์ติดตามการหายใจนี้ปลอดภัยอย่าง
แท้จริงสำหรับเด็กและถูกใช้ในโรงพยาบาลสำหรับการ
ผดุงครรภ์และสถาบันดูแลเด็กแรกเกิดทั่วโลก

สิ่งที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ดูแลทารก ซึ่งให้ส่งสัญญาณ
เสียงและวิดีโอ อุปกรณ์ติดตามการหายใจทารก NANNY
ทำหน้าที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของลมหายใจของทารก
และทำหน้าที่อย่างน่าเชื่อถือ ในป้องกันการเกิดโรคเสียชีวิต
อย่างกะทันหันของทารก(SIDS)



ใช้งานง่าย



เสียงเตือนที่ดังและตรงเวลา



อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์



ใช้ในโรงพยาบาลผดุงครรภ์

การติดตั้ง

ใคร ๆ ก็สามารถติดตั้ง
NANNY ได้

ติดตั้ง NANNY ง่ายมาก ทำได้เร็ว
ใครก็ทำได้ สามารถใส่ถ่านในอุปกรณ์
ได้ง่าย มีอายุใช้งานยาวนาน คุณจะ
ได้รับการเตือนถึงความจำเป็นต้องเปลี่ยน
ถ่วงหน้า ไม่ต้องมีการดูแลรักษาพิเศษ
ใดๆ



ใส่ถ่าน



ใส่แผ่นเซ็นเซอร์ไว้ใต้ที่นอน



เชื่อมต่อแผ่นเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์



เปิดเครื่อง